

Metilcelulose

Ophthalmos

COMPOSIÇÃO

Metilcelulose 2%
Metilcelulose..... 20,0 mg
Veículo q.s.p. 1,0 mL

Metilcelulose 4% AV (Alta viscosidade)
Metilcelulose..... 40,0 mg
Veículo q.s.p. 1,0 mL

INDICAÇÕES

- Uso Intraocular:

Como adjuvante em cirurgias do segmento anterior e outros procedimentos cirúrgicos, como extração de cataratas e implantes de lentes intraoculares. Sua função é proteger as células endoteliais da córnea e outros tecidos oculares durante processos cirúrgicos oftalmológicos.

A Metilcelulose 4% A.V. (Alta Viscosidade) Ophthalmos 36.000 cps é uma formulação especialmente preparada com matéria-prima de alta pureza e viscosidade controlada, o que propicia uma solução final com viscosidade e coesão compatíveis com as necessidades cirúrgicas da facoemulsificação.

- Uso Tópico:

Uso geral: Lubrificação ocular

Uso profissional: Exames gonioscópicos

CONTRAINDICAÇÕES

- Usos Intraocular e Tópico:

Até o momento não são conhecidas contraindicações ao uso da metilcelulose como adjuvante em cirurgias oftálmicas, para lubrificação ocular ou em exames gonioscópicos.

INSTRUÇÕES DE USO


- Uso Intraocular:

Abra o invólucro sobre o campo estéril e retire a seringa estéril.

O conjunto já vem montado para uso.

Remova a tampa protetora da seringa e rosqueie a cânula na terminação “Luer-lock” da mesma. Antes de injetar a metilcelulose, pressione levemente o êmbolo da seringa até que apareça a primeira gota do produto, que deverá ser desprezada.

A quantidade aplicada varia com o tipo de cirurgia e com as características do olho do paciente. Em geral, utiliza-se um volume de 0,2 a 0,6 mL aplicado através de uma cânula fina.

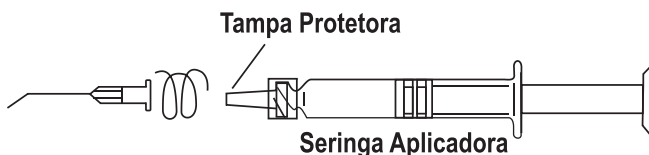

- Uso Tópico:

Lave as mãos cuidadosamente.

Incline a cabeça para trás ou deite-se olhando para cima.

Evite o contato do conta-gotas com os dedos e com a superfície das pálpebras ou do olho para evitar a contaminação do produto.

Solte a pálpebra lentamente e mantenha os olhos fechados por alguns instantes.

Não feche os olhos com força, para não extravasar o produto.

Não lave o conta-gotas

APRESENTAÇÕES

- Uso Intraocular:

Metilcelulose 2%: seringa aplicadora com 1,5 mL ou 2,5 mL e frasco-ampola

Metilcelulose 4% AV: seringa aplicadora com 1,5 mL e frasco-ampola com 2 mL

- Uso Tópico:

Metilcelulose 2%: frasco conta-gotas com 10 mL e 50 mL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AÇÃO

Produto quimicamente inerte e com alto grau de pureza.

Forma uma solução viscoelástica a 2% ou 4% (alta viscosidade), transparente e incolor, com índice de refração semelhante ao da água destilada.

O seu uso em cirurgias oftálmicas proporciona proteção mecânica aos tecidos oculares, principalmente às células endoteliais; facilita as manobras cirúrgicas e o implante das lentes intraoculares; minimiza o risco de formação de sinéquias.

PRECAUÇÕES

- Uso Intraocular:

O conteúdo permanece estéril enquanto a embalagem se mantiver fechada e intacta.

Usar o produto somente se a solução estiver límpida e livre de partículas.

Não reutilizar as cânulas.

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou violada.

Todas as precauções normais de qualquer procedimento cirúrgico devem ser tomadas.

O excesso de metilcelulose utilizada deve ser retirado por técnica de irrigação e/ou aspiração no final da cirurgia.

Deve ser evitada a formação de bolhas de ar durante a manipulação do produto antes da injeção.

REAÇÕES ADVERSAS

- Uso Intraocular:

A Metilcelulose Ophthalmos é bem tolerada após injeção em olhos humanos. Incidentes isolados de reações inflamatórias no pós-operatório (irite e hipópio), bem como edema de córnea e descompensação corneana, têm sido relatadas, mas sua relação direta com a Metilcelulose Ophthalmos não está estabelecida.

Eventualmente pode ocorrer uma elevação passageira da pressão intraocular no decorrer do período pós-operatório, que regride normalmente sem a necessidade de medicação hipotensora.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto após a data de vencimento impressa no rótulo.

- Uso Intraocular: Uso restrito ao Oftalmologista.

PRODUTO DE USO ÚNICO

PROIBIDO REPROCESSAR

DESTRUIR APÓS O USO

ESTERILIZADO POR AUTOCLAVAÇÃO

- Uso Tópico: Após aberto, utilizar o colírio, no máximo, por 30 dias.

ENVASADO ASÉPTICAMENTE

ARMAZENAGEM

A Metilcelulose Ophthalmos deve ser armazenada em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

O produto para uso intraocular não contém preservativos e deve ser desprezado após uso único.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses. Não utilize o produto após a data de validade impressa no rótulo.

PRODUTO ESTÉRIL

Observe a correlação das instruções de uso e o produto.

Para obter as instruções de uso do produto no formato impresso, entre em contato com o nosso SAC.

Data de Fabricação / Esterilização, Data de Vencimento e Lote n°: vide rótulo

Registro ANVISA n°: 10172470001



OPHTHALMOS

Registrado por: **OPHTHALMOS LTDA.** Av. Manoel Monteiro de Araújo, 1051 - Lote A - Pq. São Domingos
CEP 05113-020 - CNPJ: 61.129.409/0001-05 - São Paulo/SP

Fabricado por: **OPHTHALMOS LTDA.** CNPJ: 61.129.409/0003-69 - São Paulo/SP
Farm. Resp.: Raul Diniz Ragazzi - CRF-SP n° 56.686

SAC: 0800 2098080 / E-mail: sac@ophthalmos.com.br - Indústria Brasileira